


## ANTI-BRUMM® Zecken Test

---

### Testablauf:

#### Zecke entfernen

1. Benutzen Sie die Zeckenkarte, um die Zecke zu entfernen. Die Zecke dabei nicht mit Öl oder Klebstoff beträufeln!
2. Fassen Sie die Zecke mit der Zeckenkarte möglichst nah an der Haut. Vermeiden Sie dabei unbedingt, den vollgesogenen Zeckenkörper zu zerquetschen.
3. Ziehen Sie die Zecke langsam und gleichmässig heraus. Sollte der Zeckenkopf in der Haut bleiben, kann der entfernte Zeckenkörper dennoch eingesendet werden.
4. Geben Sie die Zecke(n) sofort in das beiliegende Proberöhrchen und schliessen Sie den Deckel sorgfältig.
5. Desinfizieren Sie die betroffene Hautstelle. Dies beugt weiteren Entzündungen vor, verhindert allerdings keine Borrelien-Infektion.

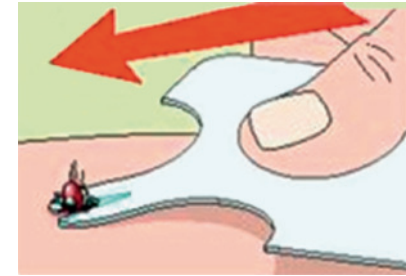

#### Zecke einsenden

6. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung und Ihr Stichprotokoll gut auf. Das aufgedruckte Login (Testnummer und Passwort) auf dieser Karte ermöglicht Ihnen später den Abruf Ihres Testergebnisses.
7. Legen Sie das Proberöhrchen in die dafür vorgesehene Ausbuchtung im Testkit zurück. Vergessen Sie nicht, den Analyseauftrag auszufüllen und beizulegen. Verschiessen Sie bitte die Originalverpackung und versiegeln Sie diese mit dem dafür vorgesehenen Probesiegel. Senden Sie die vorfrankierte und voradressierte Originalverpackung mit dem Probeinhalt ein.



#### Ergebnis abrufen

8. Zwei bis drei Werktage nach Posteingang erhalten Sie Ihr Ergebnis auf [www.zecken-test.ch](http://www.zecken-test.ch) nach Eingabe Ihres Logins (Testnummer). Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, teilen wir Ihnen unter der Nummer 0900 001 900 (CHF 1.90/Min.) das Ergebnis gerne auch telefonisch mit.

